


# SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト 簡易取扱説明書

※ 本内容は添付文書やクイックリファレンスガイドの抜粋となりますので、詳細は添付文書等をご確認ください。

## 測定の手順 — 鼻咽頭ぬぐい液 —


### 1 検体採取（鼻咽頭ぬぐい液）

スワブを鼻孔に挿入し、鼻咽頭の表面を 3～4 回擦るようにして粘膜表皮を採取します。  
鼻腔からスワブを引き出します。

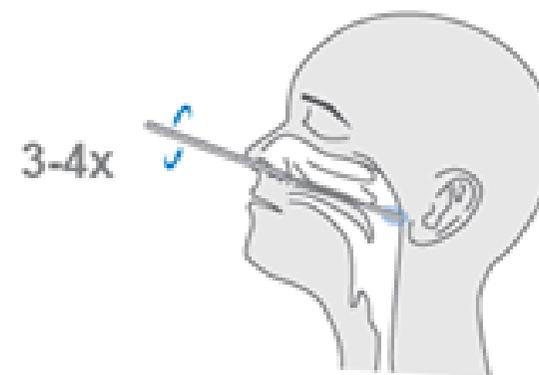

### 2 試料の調製

- A. スワブを抽出用バッファのチューブに移し、最低 5 回スワブをもみほぐします。
- B. チューブ側面からスワブ頭部をつまみ、試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、
- C. ノズルキャップをしっかりと閉めます。

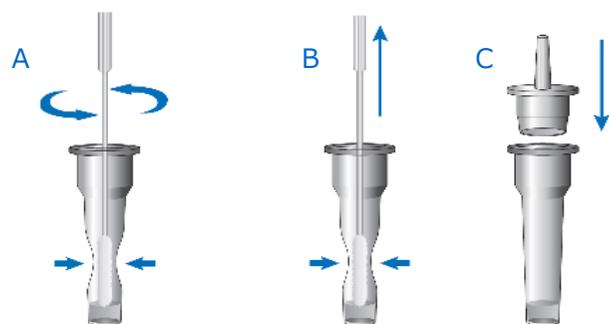

最低 5 回もみほぐす

### 3 検体の滴下

テストデバイスの検体滴下孔に真上垂直から 3 滴を滴下します。



### 4 測定結果の判定



判定時間 15～30 分



陰性の判定はコントロールラインが早めに出現した場合であっても、必ず 15 分以降に行ってください。  
また、30 分以上経過した後の判定は正確な測定結果が得られない可能性があります。

# 結果の判定法 - 判定は 15~30 分の範囲内であればいつでも大丈夫です。



**SARS-CoV-2 Rapid Ag**

測定が正しく行われたことを示す

**コントロールライン**

C

✓


**テストライン**

T

**SARS-CoV-2 抗原**



**陽性**

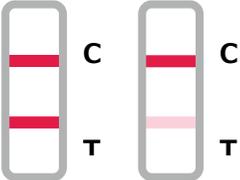

SARS-CoV-2 抗原が陽性であり、感染性を持っていることを示します。

(測定結果が陽性の場合でも、診断は本製品による検査結果のみで行わず、常に患者の病歴、その他の臨床検査結果、およびその他の臨床症状も含めて総合的に判断してください。)



**陰性**




SARS-CoV-2 抗原は検出されませんでした。

(検査結果が陰性の場合でも、SARS-CoV-2 感染の可能性を否定することはできず、必要に応じて、ウイルス培養、PCR 法または抗原定量検査等により確認してください。)



**無効**

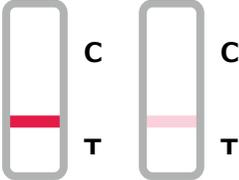

測定は無効です。